

Bettisch-Server Pleto

Gebrauchsanweisung

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN;SORGFÄLTIG LESEN



Bettisch: Höhe anheben

An Galeriebügel gleichmäßig nach oben ziehen

Bettisch: Höhe absenken


Rollenfeststellung

Fest = Pedal treten

Gelöst = Pedal anheben



Bettisch: Höhe absenken

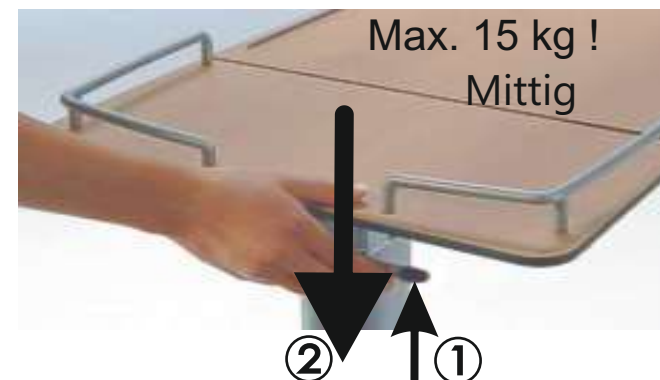

- ① Bedienhebel nach oben ziehen
- ② Bettisch durch Drücken in gewünschte Höhe bringen; Bedienhebel loslassen

Bettisch: Schwenkung



- ① Bedienhebel unter Bettisch nach oben ziehen
- ② Bettisch schwenken und Bedienhebel in gewünschter Position loslassen; Bettisch weiter drehen bis zum Einrasten; Bedienhebel loslassen

Sicherheitshinweise



Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise!

- ✎ Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch, um Schäden durch Fehlbedienung zu vermeiden.
- ✎ Reinigen und desinfizieren Sie den Bettisch-Server vor der Erstbenutzung und jedem Wiedereinsatz.
- ✎ Weisen Sie jeden Patienten in die sichere Bedienung des Bettisch-Servers ein!
- ✎ Überzeugen Sie sich vor jeder Benutzung vom ordnungsgemäßen und fehlerfreien Zustand des Bettisch-Servers!
- ✎ Die maximale Belastung der Bettischplatte beträgt 15 kg mittig. Nicht aufstützen! Kippgefahr!

Allgemeine Hinweise

1. Freilauffunktion

In Abhängigkeit von Toleranzen in der Säulenkonstruktion und Gasfederbefüllung sowie Umgebungstemperaturschwankungen kann sich der Bettisch aus der untersten Verstellposition eigenständig um ca. 5,0cm nach oben verstellen.

2. Bettischplatten

Die Bettischplatten können bedingt durch Lagerung und Temperaturschwankungen leichte Durchbiegungen aufweisen, die auf die Funktion jedoch keine Auswirkungen haben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ✎ Bettisch-Server zur Verwendung in Patientenzimmern von Krankenhäusern und vergleichbaren medizinischen Einrichtungen.
- ✎ Der Bettisch-Server darf nicht als medizinischer Gerätewagen verwendet werden.

Wichtige Hinweise zu Reinigung und Pflege

Wir empfehlen Rückstände (Kaffee, Tee, Fruchtsäfte) innerhalb von 72-96 Stunden mit lauwarmen Wasser oder einem Mittel zur Reinigung und Flächendesinfektion zu entfernen.

Verschmutzungen mit eingefärbten Desinfektionsmitteln müssen unverzüglich, jedoch spätestens nach 24 Stunden entfernt werden. Bei längerer Einwirkzeit ist eine Schatten- bzw. Restfleckenbildung nicht auszuschließen.

Bei Verunreinigungen mit lösemittelhaltigen Produkten wie Druckerschwärze oder Filzstift empfehlen wir den Einsatz von Spiritus.

Zur Pflege können die Oberflächen gelegentlich mit einem Kunststoffreiniger behandelt werden.

Nicht verwendet werden dürfen:

- ✎ Topfschwämme, Stahlwolle, Scheuermilch oder andere kratzende Mittel;
- ✎ Reinigungsmittel auf Aceton-Basis.

Bettisch-Server Pleto

Gebrauchsanweisung



Technische Daten

Außenmaße (BxHxT): 900x690x420 mm


Laufrollen: 2 Stück Doppelrolle je 50mm; Einzelrad-Feststellung
2 Stück Doppelrolle je 50mm

Bettisch: Abmessungen: 420x650 mm
Belastbarkeit : max. 15 kg in der Mitte
Verstellbereich: ca. 690 - 1040 mm

Wartung:

Der Bettisch-Server ist wartungsfrei.

Maßskizze

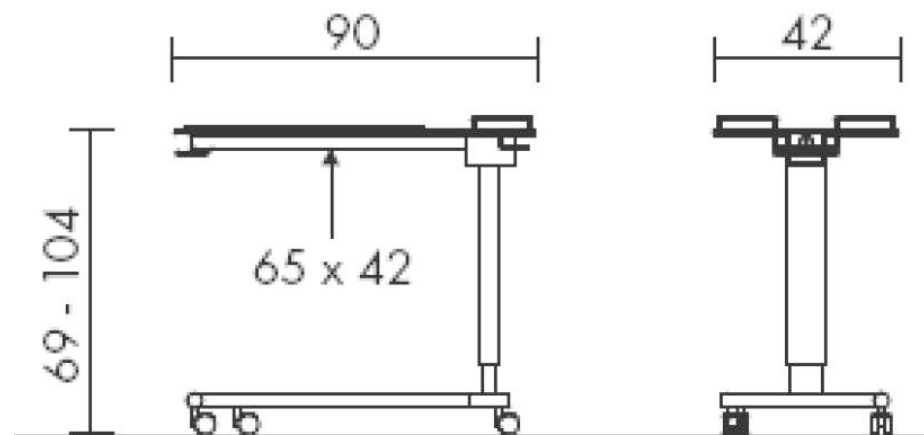

Ersatzteile

Um Funktionssicherheit und Garantieansprüche zu erhalten, dürfen nur Stieglmeyer Original-Ersatzteile verwendet werden!

Für Ersatzteilbestellungen, Kundendienstanforderungen und bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42, 32051 Herford

Telefon: +49 (0) 5221 / 185-777

Fax : +49 (0) 5221 / 185-219

Email: servicezentrum@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.com

Kunden außerhalb Deutschlands können sich mit allen Fragen an unsere Vertriebsgesellschaften im jeweiligen Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite.