

LIEFERUMFANG:

10 Pads, ø 9 cm, selbstklebend

1 Positionierungshilfe

1 Montageanleitung

Artikelnr.: 51010

*Alle Angaben und/oder Empfehlungen sind reine Erfahrungswerte und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es obliegt dem Besteller bzw. Verleger, vor Verwendung der **variosafe** Selbstklebe-Pads, selbst zu prüfen, ob sie sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Einsatzzweck eignen.*

variosafe
Der Rutschschutz für Dusche & Bad



delficare GmbH
Rehabilitationstechnik

Weißbachstraße 1
D-88316 Isny/Allgäu

Tel. +49 (0) 75 62 / 91 25 11
Fax. +49 (0) 75 62 / 91 25 24

e-mail: info@delficare.de
www.delficare.de

Demontage



- Für die **Demontage** werden die geklebten Pads mit einem Föhn vorsichtig mit Abstand erwärmt und langsam mit Feingefühl abgezogen. Wenn Sie dies nicht machen, können Beschädigungen am Untergrund die Folge sein.

Das sollten Sie beachten:

Variosafe Selbstklebe-Pads sollten nicht unter Raumtemperatur von +12°C verklebt werden. Auch die zu beklebende Fläche muss mindestens +12°C haben. Der Untergrund muss absolut trocken, staub- und fettfrei sein. Naturstein muss nicht nur an der Oberfläche trocken aussehen, sondern richtig durchgetrocknet sein (Restfeuchtigkeit steigt an die Oberfläche und kann bei frischverlegten variosafe Selbstklebe-Pads den Kleber anlösen und die Haftfähigkeit mindern!)


Beschichtungen (wie z.B. Farben und Lacke) müssen fest haften. Je glatter die Oberfläche, desto besser die Haftung der Pads. Strukturierte Oberflächen meiden! Variosafe Selbstklebe-Pads nicht auf Fliesenböden verkleben, die durch Fugen unterbrochen werden. Eine Haftung im Fugenbereich ist nicht gegeben, weil die Fugen tiefer liegen, als die Fliesenoberfläche.

Auch bei Oberflächen mit Nanobeschichtung oder Lotuseffekt ist eine Verklebung nicht möglich. Bei kritischen Untergründen sollte immer eine Probeverklebung durchgeführt werden! Variosafe Selbstklebe-Pads je nach Nutzung regelmäßig kontrollieren und beschädigte, abgenutzte oder abgelöste Pads erneuern.

Die Pads sind zwar wasserbeständig, dürfen aber nicht permanent unter Wasser stehen. Die Pads müssen regelmäßig (nach dem Duschen, bzw. Baden, abtrocknen können. Andernfalls kann sich der Kleber lösen.

variosafe
Der Rutschschutz für Dusche & Bad

Montageanleitung

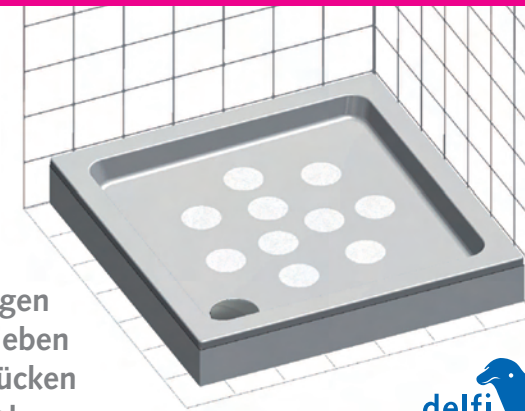

Reinigen
Aufkleben
Andrücken
Fertig!



1.



- Bei alten Wannen die Fläche zuerst mit einem handelsüblichen Kalkreiniger vorbehandeln. Danach den Untergrund reinigen und entfetten (z.B. mit Alkoholreiniger).

Die Pads bitte nicht auf nassen, rauen Fliesen, Fugen oder veredelten Oberflächen (Nanobeschichtung, Lotuseffekt) kleben.

2.




- Auf den getrockneten Untergrund die **delficare** Positionierungshilfe für eine gleichmäßige Aufteilung der **variosafe** Selbstklebe-Pads legen.

3.



- Rückseitige Schutzfolie der **variosafe** Selbstklebe-Pads vom Rand her abziehen. Die Klebefläche dabei nicht mit den Fingern berühren!

4.

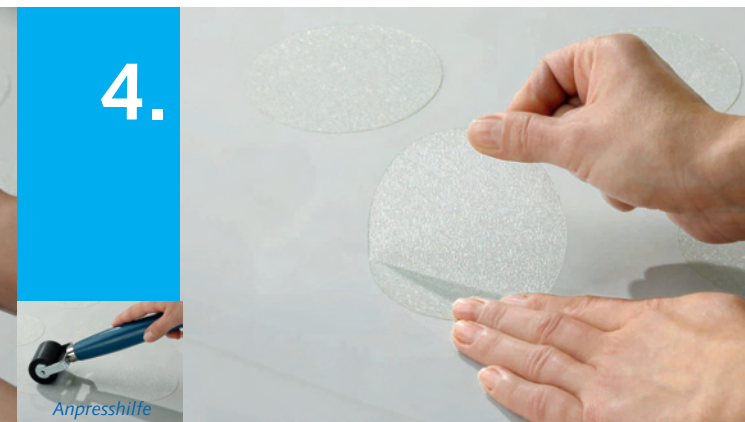

- Pads Stück für Stück aufkleben und fest andrücken, denn der Pressdruck ist entscheidend – nicht die Presszeit! Die Pads gleich richtig positionieren. Wiederholtes Abziehen und Korrigieren mindert die Klebekraft.
- Die Positionierungshilfe entfernen und die Pads 12 Stunden trocknen lassen. Danach kann der Nasszellenbereich wieder benutzt werden.

