

Gebrauchsanleitung

Soft-Auflage zu laguna Badewannensitzen

REF **78700 000, -100**

REF **78700 150**



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

Indikation/Kontraindikation

Die Soft-Auflage kann zusammen mit den oben genannten laguna Produkten eingesetzt werden. Insbesondere druckempfindliche Personen profitieren so von einem noch weicheren, komfortableren Sitzen.

Sicherheitshinweise

- Es gelten alle Hinweise, die den laguna Badewannensitzen beiliegen.
- Die max. Belastbarkeit ergibt sich aus derjenigen des mitgenutzten laguna Produkts.
- Die Soft-Auflage darf ausschließlich in Verbindung mit den o.g. laguna Produkten benutzt werden. Sie darf nicht auf andere Badewannensitze platziert werden!
- Stellen Sie vor jeder Nutzung sicher, dass die Soft-Auflage fest und sicher auf dem Badewannensitz aufliegt.
- Bevor Sie die Soft-Auflage montieren, vergewissern Sie sich von der korrekten und sicheren Montage des laguna Produkts, auf das Sie die Soft-Auflage anbringen wollen.

Lieferumfang


1x Soft-Auflage, 1x Befestigungsclip

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Bei erkennbaren Mängeln oder fehlenden Teilen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.



Montage

1. Stellen Sie sicher, dass der laguna Badewannensitz gemäß der Gebrauchsanleitung montiert ist.
2. Platzieren Sie die Soft-Auflage so über Ihrem laguna Produkt, dass die mittigen Ausparungen direkt übereinanderliegen.
3. Führen Sie nun den Befestigungsclip senkrecht in die Aussparung, um die Soft-Auflage fest mit der Sitzfläche zu verbinden. Ein deutlich hörbares Klick-Geräusch zeigt Ihnen, dass der Clip sicher sitzt und die Auflage korrekt befestigt ist.

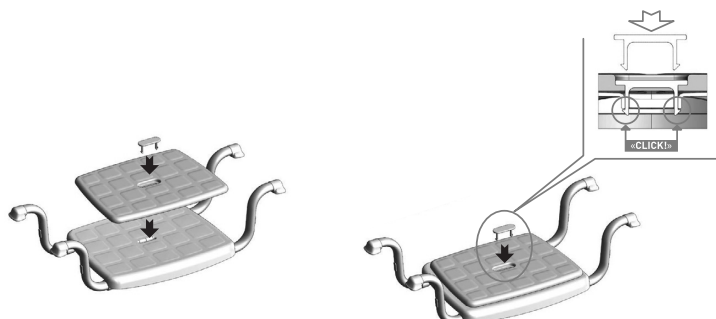

Reinigung/Desinfektion

Für die manuelle Reinigung sind warmes Wasser und ein neutraler Reiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem handelsüblichen, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!

Material


- Ethylenvinylacetat

Entsorgung

Entsorgen Sie die Softauflage nicht einfach über den normalen Hausmüll. Fragen Sie vorher Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen nach der sach- und umweltgerechten Entsorgung in Ihrer Region.

Technische Daten

- Maße: 26 x 34 x 1,4 cm (L x B x H).
- Erhöhung der Sitzhöhe: 1,4 cm.

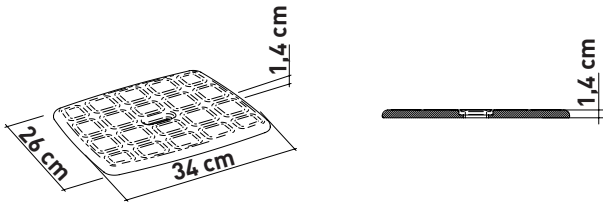

Produktkennzeichnung

In der folgenden Tabelle werden die für die Kennzeichnung von RUSSKA Produkten verwendeten Symbole erläutert. Der Übersetzungsschlüssel bezieht sich auf unser gesamtes Sortiment – bitte entnehmen Sie der Kennzeichnung Ihres erworbenen Produktes, welche Symbole tatsächlich relevant sind.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Hersteller des Produktes		eindeutige Produktidentifizierung (Unique Device Identification)
	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz		Maximales Benutzergewicht
	Importeur		Maximale Gepäckzuladung
	Vertriebspartner		Maximale Breite
	CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte		Für Gebrauch in geschlossenen Räumen und im Freien konstruiert
	Medizinprodukt		Maximale Belastbarkeit
	Gebrauchsanweisung beachten		Maximale Greif-/Traglast
	Seriennummer		Maximale Beanspruchungskraft
	Chargenbezeichnung		Naturkautschuklatex ist enthalten oder anwesend
	Katalognummer		Vor Sonnenlicht schützen
	Herstellungsdatum		Trocken aufbewahren

Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen, kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.
Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.
Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, www.basg.gv.at.
Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, www.swissmedic.ch.