

Der Bettgriff / Aufstehhilfe BAR1000 ist für den Einsatz an handelsüblichen Betten und Pflegebetten im Klinik- und Privatbereich konzipiert.

Er dient als Halte – und Aufstehhilfe bei Patienten in Pflegebetten.

- **Funktion:** Dient als Einstiegshilfe und Unterstützung beim Aufstehen im Bett.
- **Montage:** Der Griff wird in der Regel zwischen Matratze und Lattenrost geschoben. Er wird hier mit den Gurten um die Liegefläche fest fixiert.
- **Sicherheit:** Es ist darauf zu achten, dass der Griff stabil sitzt und die Matratze nicht zu leicht ist, damit der Griff beim Belasten nicht verrutscht. Es muss darauf geachtet werden, dass die Gurte nicht eingeklemmt und nicht um bewegliche Teile des Bettes gebunden werden.
- **Reinigung:** Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischbar.

Vor jedem erneuten Einsatz ist der Griff auf einen festen Sitz und die Unversehrtheit zu prüfen.