

Der Bettbogen wird zur Vermeidung des Hautkontakt mit der Bettdecke verwendet. Er dient der Vorbeugung bzw. bei der Therapie von Dekubitalgeschwüren und verhindert die Entstehung einer Spitzfußstellung durch das Gewicht der Bettdecke.

Bei Nichtgebrauch kann der Bettbogen platzsparend zusammengeklappt werden.

Montage:

1. Lesen Sie vor der ersten Nutzung diese Bedienungsanleitung durch. Bewahren Sie die Anleitung auf.
2. Klappen Sie den Bettbogen auf und fixieren Sie ihn durch Verschieben der Mittelleiste nach oben.
3. Stellen Sie den Bettbogen über die zu entlastenden Körperpartien. Legen Sie dann die Bettdecke über den Bettbogen.
4. Wenn Sie den Bettbogen wieder entnehmen wollen, entfernen Sie die Bettdecke und schieben Sie die Mittelleiste zur Seite. So ist der Bettbogen wieder zusammenfaltbar.

Reinigung und Pflege:

Das Hilfsmittel kann mit handelsüblichen, chlorfreien Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Dabei sind immer die Angaben des Herstellers des jeweiligen Desinfektionsmittels zu beachten.

Die Reinigung des Bettbogens kann ebenso mit einer milden Seifenlauge und einem Tuch erfolgen. Zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden und kein Scheuermittel bzw. –schwamm oder Bürsten verwenden. Keine Anwendung von konzentrierten Säuren und Laugen.

Sicherheitshinweise:

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Produkt beschädigt ist. Achten Sie auf den festen Sitz der Schrauben und Abdeckungen. Ein beschädigtes Produkt darf aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden.
- Der Bettbogen darf nicht mit schweren Gegenständen belastet werden. Er ist ausschließlich zum Auflegen der Bettdecke gedacht. Bitte nutzen Sie den Bettbogen nicht zum Hochziehen oder Aufstützen. Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt werden.
- Wenn der Nutzer nicht über ausreichende körperliche und mentale Fähigkeiten verfügt, um das Produkt sicher zu nutzen, ist die Anwesenheit einer Aufsichtsperson erforderlich.